

## **Pflege und Reinigung der textilen Mund-Nasenbedeckungen**

Für die optimale Wirkung eines wiederverwendbaren textilen Mund-Nasen-Schutzes ist darauf zu achten, dass er enganliegend getragen und bei Durchfeuchtung gewechselt wird. Sinnvoll ist die Anschaffung von drei textilen Mund-Nasenbedeckungen pro Person (eine in Benutzung, eine zum Wechseln bei Bedarf und einer in der Reinigung). Wegen der Gefahr der Sporenbildung soll eine feuchte Mund-Nasenbedeckung nicht in einer geschlossenen Plastiktüte oder Brotdose sondern „atmungsaktiv“ aufbewahrt werden (z.B. ein Stoffbeutel, der mit desinfiziert werden kann).

Die textile Mund-Nasenbedeckung ist grundsätzlich trocken zu lagern. Vor dem Aufsetzen und nach dem Ausziehen sollte eine gründliche Händewaschung mit Seife durchgeführt werden. Nach der Benutzung ist die Mund-Nasebedeckung vorsichtig auszuziehen. Dabei soll die Außenfläche nicht berührt werden. Gebrauchte Mund-Nasebedeckungen sollten nach der Benutzung bzw. mindestens einmal täglich gereinigt werden.

Für die thermische Desinfektion empfehlen sich eine Waschtemperatur von 90 Grad Celsius und eine Einwirkzeit von zehn Minuten (Waschmaschine oder Kochtopf).

Alternativ Reinigung mit Desinfektionswaschverfahren (60°) in der Waschmaschine mit geeignetem Waschmittel gemäß Anleitung.

Anschließend ist die textile Mund-Nasebedeckung vor einer erneuten Verwendung vollständig an der Luft oder im Trockner zu trocknen.

(Krankenhaushygiene EKM – Stand 24.04.2020, ausgedruckt unterliegt das Dokument nicht dem Änderungsdienst)